

Instrucciones para la coleccion y regreso de muestras de semen entregadas al dia siguiente

Estas instrucciones son proporcionadas por Fairfax Cryobank, Inc. (en adelante, Cryobank).

- **Refrigere los kits al recibirlos.** El líquido de transporte debe almacenarse entre 2-8 °C hasta 1 hora antes de la colección de la muestra.
- El kit incluye: Taza de muestra con bolsa de transporte, una botella de medios de transporte, empaque de devolución y todo el papeleo.
- **Haga arreglos para recolectar el espécimen lo más cerca posible de la hora de empaque y devolución.** Si planea enviar varios kits, espere un mínimo de 48 horas entre cada eyaculación.

Instrucciones de colección y envío:

- Para la mejor calidad de muestra de semen, el cliente debe observar un período de 48 a 120 horas de abstinencia de eyaculación.
- Antes de la colección, permita que el líquido de transporte se caliente a temperatura ambiente (aprox. 60 minutos).
 - o ****Falla del calentamiento del líquido de transporte a temperatura ambiente podría resultar en daño a la muestra de semen.**
- La estimulación manual (masturbación) es el método aceptable para obtener la muestra de semen.
 - o Si se requiere lubricante, no use ningún artículo que sea espermicida. **No use un condón para la recolección.**
- La botella de plástico vacía etiquetada como "Botella de colección" incluida en el kit es para la recolección de la muestra de semen.
 - o **No lave este frasco: es estéril y está listo para la recolección del semen.**
 - o **Escriba el nombre completo del Depositante en el espacio indicado de la botella de colección**
- Coleccione el espécimen en la botella de colección.
- Después de la recolección, vierta suavemente el "líquido de transporte" en la botella de colección que contiene la muestra de semen.
 - o El líquido es un conservante biológico no peligroso que protegerá su espécimen durante el transporte.
 - o Deseche la botella vacía del "líquido de transporte" después de haber vaciado el líquido en la botella colección con la muestra.
- Cierre firmemente la tapa de la botella que contiene el líquido de transporte y el semen. Incline suavemente la botella hacia adelante y hacia atrás para mezclarla.
 - o **NO LO AGITE.** Asegúrese de que la tapa esté bien colocada y que no haya signos visibles de fuga.
- Coloque la botella sellada y etiquetada en la bolsa de riesgo biológico (Biohazard) y selle la bolsa.
- Coloque la bolsa sellada en uno de los recortes de cartón ubicados en el kit.
- **Mantenga la muestra de semen a temperatura ambiente para el envío**
- **DEBE** devolver la documentación completa proveída: Recolección de muestras fuera del sitio, Acuerdo del depositante de semen para la evaluación, congelación y almacenamiento, Acuerdo de facturación, Información del cliente de almacenamiento, Cuestionario para el cliente y Pruebas médicas y genéticas para clientes depositantes.
- **Se requiere el pago en el momento de la recepción de la muestra para el procesamiento.**
- Coloque el kit con los documentos completos y la muestra de semen, en el "Sobre de muestra de diagnóstico" de FedEx y selle.
- El **FedEx** "Priority Overnight Pak" incluido y prepagado entregará el kit antes de las 10:30am del siguiente día laboral. El espécimen debe llegar a Cryobank antes del mediodía, **de martes a viernes.**
 - o La devolución por parte de otros transportistas como United Parcel Service (UPS) corre a cargo del cliente.
- Envíe los análisis de sangre requeridos con su primer kit o por fax al 651-489-0340 o correo electrónico a Rosevillecryo@fairfaxcryobank.com.

- Cuando el paquete esté listo para enviar, comuníquese con Cryobank a Rosevillecryo@fairfaxcryobank.com con el número de seguimiento de **FedEx**. Si no envía por correo electrónico su número de seguimiento, puede resultar en un retraso en el procesamiento de su muestra.
- Personal de Cryobank le enviara los resultados por correo electrónico al siguiente día laboral a no más tardar de 4pm CST.

No asumimos ninguna responsabilidad por envíos perdidos o retrasados o por especímenes que se envían por métodos distintos a los descritos anteriormente. Los kits no utilizados no se pueden devolver a Cryobank para obtener crédito. Las muestras recolectadas con kits están destinadas a su uso en futuros procedimientos de inseminación con una pareja sexualmente íntima solamente.

Si tiene alguna pregunta sobre el envío de sus muestras de semen, contáctenos al 1-800-338-8407.